

Guía de formación

Ocarine
by CINCOS



Índice

- ❖ Tecnología con efecto Termodinámico Ocarine
- ❖ Cómo actúa la termodinámica en la disminución y remodelación de la grasa localizada
- ❖ Papel del efecto termodinámico en el sistema linfático
- ❖ Efecto de la termodinámica para estimular la producción y regeneración de fibras colágenas, de elastina y disminuir la flacidez
- ❖ Contraindicaciones
- ❖ Precauciones y efectos secundarios
- ❖ Efecto termodinámico
- ❖ Antes del tratamiento – Anamnesis
- ❖ Información del paciente
- ❖ Gestión de las expectativas del cliente
- ❖ Programas de tratamiento
- ❖ Procedimiento
- ❖ Recomendaciones de utilización y seguridad
- ❖ Procedimiento de aplicación
 - Tratamiento de Abdomen
 - Tratamiento de Flancos
 - Tratamiento de glúteos
 - Tratamiento de piernas
 - Tratamiento Brazos

Tecnología con efecto Termodinámico Ocarine

La tecnología con efecto termodinámico Ocarine ofrece doble energía de manera síncrona a los tejidos diana:

• **Onda ultrasónica:** dirigida a la dermis y la hipodermis.

• **Onda electromagnética:** en movimiento, efectos que se concentran hasta la epidermis.

Efecto combinado de permeabilidad celular, mejora circulatoria, descomposición de la grasa tanto en la capa dérmica, como en la epidérmica, dan como resultado un efecto rápido y duradero.



Efectos sobre la capa de grasa:

1. **Movimiento celular:** permeabiliza la membrana celular facilitando la liberación de los ácidos grasos
2. **Presión sobre las células:** movimiento mecánico del aplicador
3. **Calor:** el aumento térmico desencadena procesos de degradación de la grasa en ácidos grasos y glicerol, lo que se conoce como lipólisis
4. **Maximiza la eliminación de grasa y drenaje**

Efectos sobre la capa dérmica:

El resultado del calentamiento dérmico es el estiramiento de la piel, estimulando la regeneración del colágeno.


Indicado para:


Modelado corporal no invasivo, estiramiento de la piel, la reducción de la celulitis, el tratamiento de la flaccidez.

Efectos clínicos:

El aumento en la reducción de grasa y su eliminación a través del drenaje mejorado además de regeneración de colágeno dérmico.

Fig. 1 Funcionamiento de la Tecnología Termodinámica

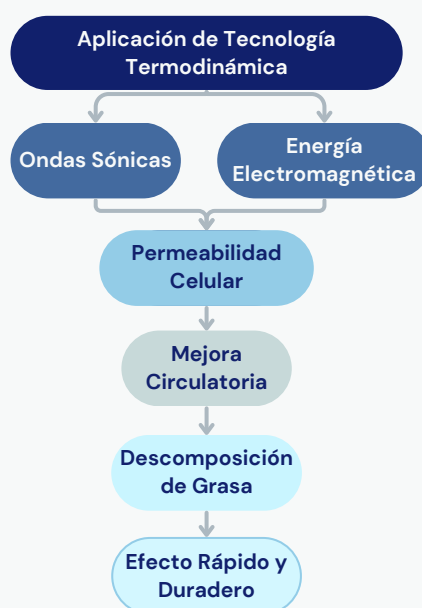

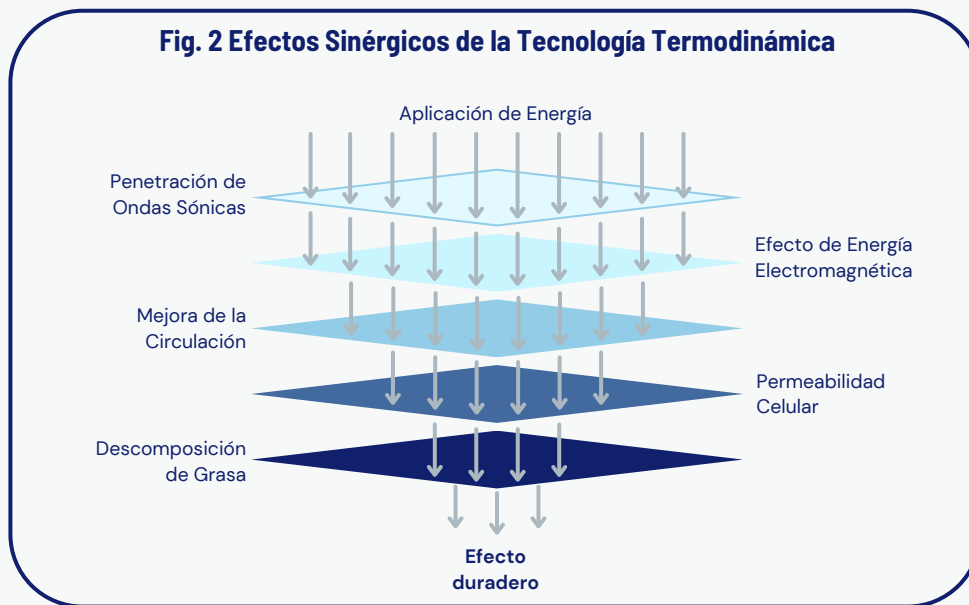


La energía que fluye desde pieza central a semilunas.

La profundidad de penetración es controlada y limitada **solamente** a la zona de tratamiento.

La emisión de efecto termodinámico está diseñada para tratar de manera síncrona y homogénea a nivel profundo y superficial reduciendo grasa y tensando tejidos

La sincronía da como resultado:


- ❖ Alta densidad de energía—Resultados visibles desde el primer tratamiento y resultados duraderos clínicamente probados.
- ❖ Bajo consumo de energía—Sin dolor; los pacientes reportan una experiencia muy agradable.
- ❖ Frecuencia de sincronía de 1MHz: segura y eficaz para la remodelación del colágeno y tratamiento de las células grasas.
- ❖ No necesita enfriamiento de la piel.
- ❖ Adecuado para todo tipo de piel y fototipos.

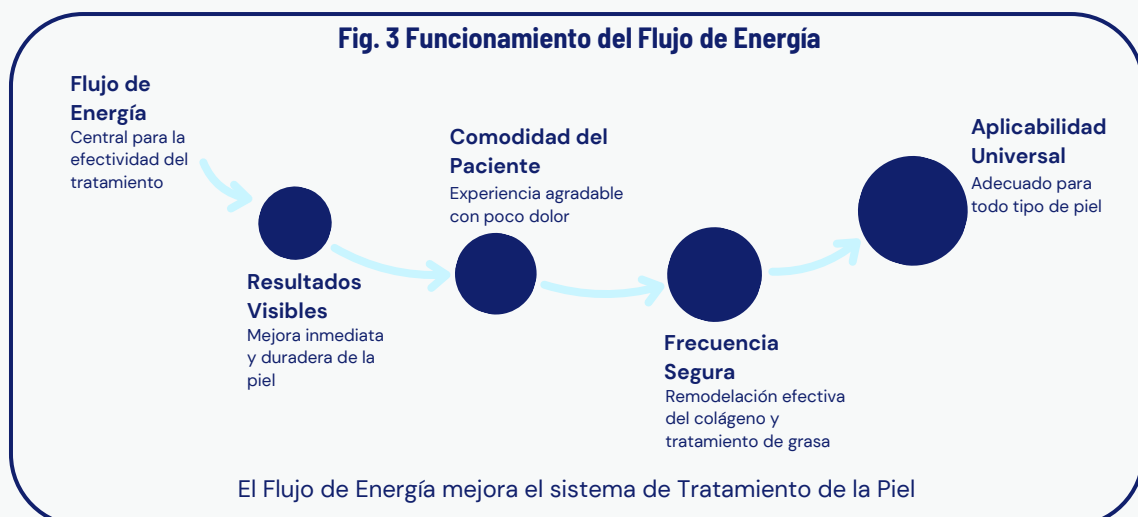

Cómo actúa la termodinámica en la disminución y remodelación de la grasa localizada

Todo depende del balance bioquímico energético del cuerpo, tal balance, consiste en almacenar energía en forma de grasa, y al mismo tiempo eliminar la grasa en forma de energía.

Grasa: Energía eres y energía volverás a ser. (Ley conservación energía)

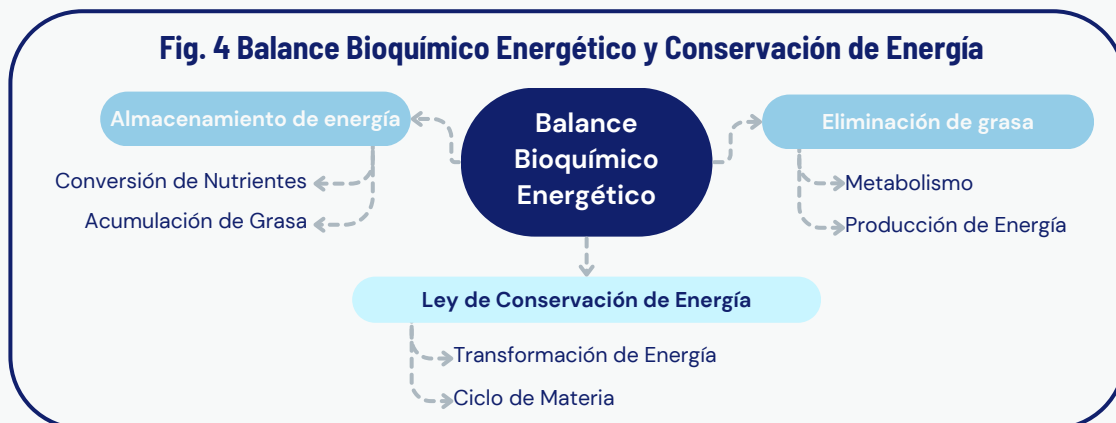

El efecto termodinámico actúa como un “potenciador fisiológico” para eliminar grasa, ya que la termodinámica utiliza la misma ruta metabólica que utiliza el organismo ya sea cuando se somete al ejercicio físico o a cambios de reducción calórica en la dieta o ambos.

En este efecto lipolítico potenciador la energía con efecto termodinámico activa, de forma localizada en el tejido adiposo, enzimas como las lipasas que degradan los adipocitos en triglicéridos, luego en lípidos (ácidos grasos y glicerol), para finalmente movilizarlos a la mitocondria.

Es en la mitocondria donde la grasa descompuesta podrá sufrir 2 transformaciones:

1. En energía que se eliminará a través de los fluidos de desechos del organismo
2. Como reserva energética en forma de nueva grasa.



Papel del efecto termodinámico en el sistema linfático


En el caso de querer reducir la grasa localizada de manera efectiva, la transformación de la grasa como reserva energética almacenada en forma de nueva grasa, es un efecto no deseado en los tratamientos estéticos reductores, para evitarlo, es importante estimular el sistema linfático.

Se ha comprobado que Ocarine a través de sus vibraciones dinámicas, tiene cierto efecto estimulante del sistema linfático, lo cual es importante para lograr la excreción corporal de desechos metabólicos.



Es por ello que los médicos recomiendan que durante toda terapia lipolítica tanto invasiva como no invasiva, deberá ir de la mano con estimulación de la red linfática, ya sea:

- ❖ Fisiológicamente con ingesta abundante de agua
- ❖ Manualmente con drenaje linfático manual
- ❖ Con aparatología específica para tal fin (como el empleo de presoterapia, Sculptor, etc.) solos o combinados

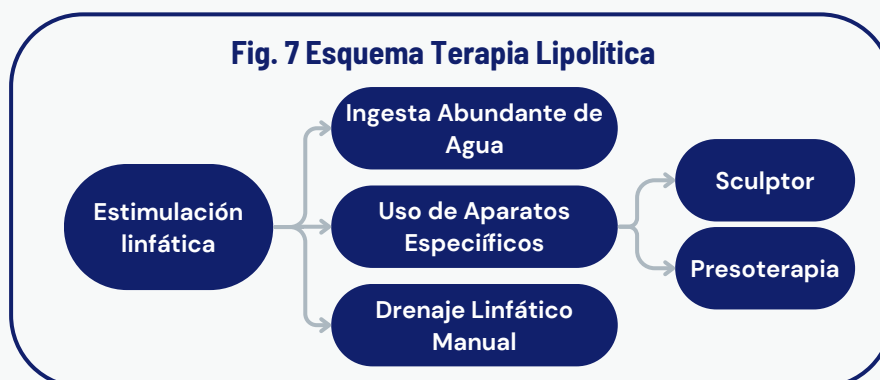

Efecto de la termodinámica

para estimular la producción y regeneración de fibras colágenas, de elastina y disminuir la flacidez

La piel se vuelve flácida cuando la dermis pierde su grosor ya sea porque no produce fibras colágenas debido al envejecimiento o por la pérdida de grasa subcutánea.

Esta energía de efecto termodinámico, que implica vibración y efecto térmico ya que eleva la temperatura lo suficiente para activar las HSP70, se transmite por el cabezal y es absorbida por la piel para activar el aporte sanguíneo de oxígeno y nutrientes, y por ende su grosor, formando al cabo de 3 semanas aproximadamente nuevas fibras colágenas que devolverán la firmeza y elasticidad de la piel, disminuyendo con este proceso la flacidez.

Imágenes por ecografía de los tejidos

Imágenes por ultrasonidos que demuestren un aumento focalizado de las capas superficiales de la piel y profundas:

Antes



Después



Contraindicaciones

Los pacientes con las siguientes condiciones no deben ser tratados:

- ❖ Marcapasos o desfibrilador interno, neuroestimuladores implantados o cualquier otro dispositivo eléctrico interno. No utilizar en pacientes que han tenido un implante en el pasado a menos que esté absolutamente seguro de que el implante y todos los cables en su totalidad han sido eliminados
- ❖ Implantes metálicos u otros implantes en el área de tratamiento.
- ❖ Embarazo o lactancia o en el abdomen durante la menstruación.
- ❖ Cáncer actual o antecedentes, especialmente cáncer de piel o lunares premalignos.
- ❖ Deterioro del sistema inmunológico debido a enfermedades inmunosupresoras tales como el SIDA y el VIH, o el uso de medicamentos inmunosupresores.
- ❖ Condiciones severas concurrentes, tales como trastornos cardíacos o epilepsia.
- ❖ Los pacientes cuyo estado podría verse afectado negativamente por el calor. Pacientes con una historia de enfermedades estimuladas por el calor, tales como Herpes Simplex recurrente en el área de tratamiento, sólo pueden tratar después de un régimen profiláctico.
- ❖ Pacientes con percepción disminuida o exagerada de los cambios de temperatura.
- ❖ Los pacientes que tienen áreas de discapacidad sensorial (lesiones nerviosas/neuropatías)
- ❖ Cualquier alteración activa en el área de tratamiento, tales como úlceras, hemorragias o riesgo de hemorragias, condiciones sépticas, psoriasis, eczema y erupción cutánea, así como piel recién /excesivamente bronceada.
- ❖ Las venas varicosas en el área de tratamiento. En pacientes que hayan padecido complicaciones vasculares: trombosis, embolias o aterosclerosis
- ❖ Historia de trastornos de la piel tales como cicatrices queloides, cicatrización anómala de heridas, así como la piel muy seca y frágil.
- ❖ Cualquier procedimiento quirúrgico, invasivo, ablativo en el área de tratamiento antes de la curación completa.
- ❖ Según criterio del médico, se abstengan de tratar cualquier condición que pudiera hacerlo inseguro para el paciente.


Fig. 8 Comprendiendo las contraindicaciones



Precauciones y efectos secundarios

Debe tomarse precaución especial en los siguientes casos :


- Los pacientes que toman medicamentos, preparaciones de hierbas, suplementos alimenticios o vitaminas que pueden causar piel frágil o con problemas de curación de la piel tales como el régimen prolongado de esteroides, isotretinoína (Accutane), tetraciclinas, o hierba de San Juan.
- Los pacientes que tienen reacción alérgica a algún principio activo.
- Paciente con cualquier condición médica que pueda perjudicar la curación de la piel.
- Procedimientos estéticos en el área de tratamiento, tales como: rellenos, oro /hilos de plástico, los implantes de grasa.

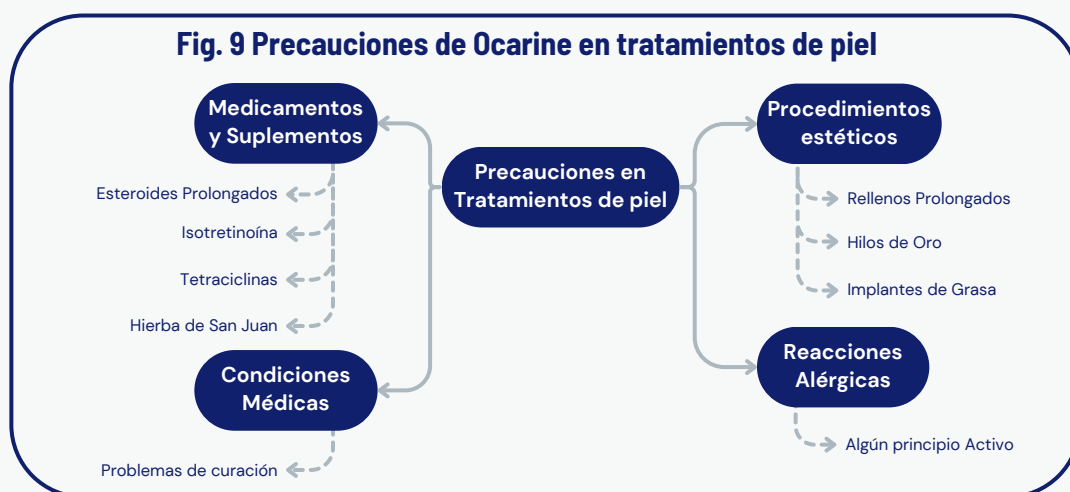

Nota: En caso de duda sobre los posibles efectos secundarios, asesorar al paciente que consulte a su médico y traiga la aprobación médica.

Efectos secundarios

Aunque los siguientes síntomas son muy poco frecuentes y generalmente temporal, las condiciones extremas deben ser reportados a un médico.

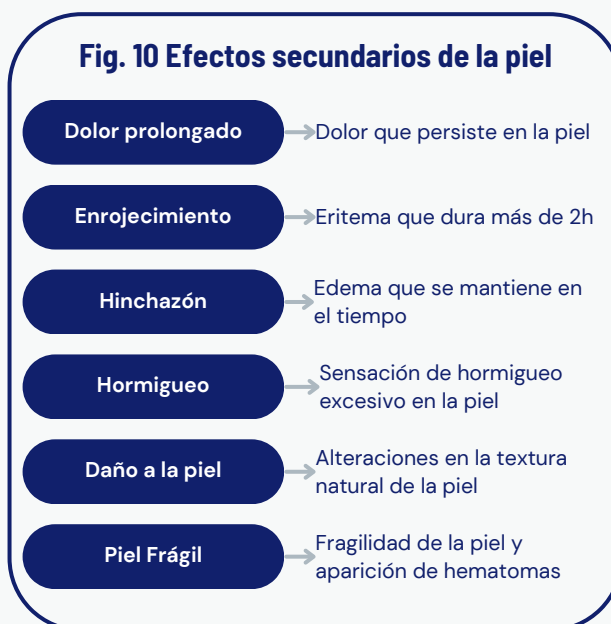

Efecto termodinámico



Al aplicar temperatura, presión y movimiento de manera controlada, se activa el metabolismo celular para reducir la grasa localizada, mejoramos la circulación sanguínea y linfática con la consiguiente eliminación de toxinas y edema.

Movimiento


- ❖ Acelera el metabolismo natural de la grasa
- ❖ La grasa líquida es liberada de los adipocitos en la matriz extracelular

Presión y temperatura


- ❖ La eliminación de grasa se acelera por la aplicación simultánea de la presión eléctrica y temperatura sobre la capa de grasa.
- ❖ El efecto térmico acelera el metabolismo natural de la grasa tejido adiposo. La grasa líquida es liberada de los adipocitos en la matriz extracelular en contra de la presión eléctrica aplicada externamente del aplicador.

El resultado es un efecto de "compresión" en la capa grasa ya licuada. A largo plazo, el aumento del metabolismo de los fibroblastos conduce a la regeneración del colágeno como resultado un efecto tensor de la piel a largo plazo.

Fig. 11 Proceso del efecto termodinámico

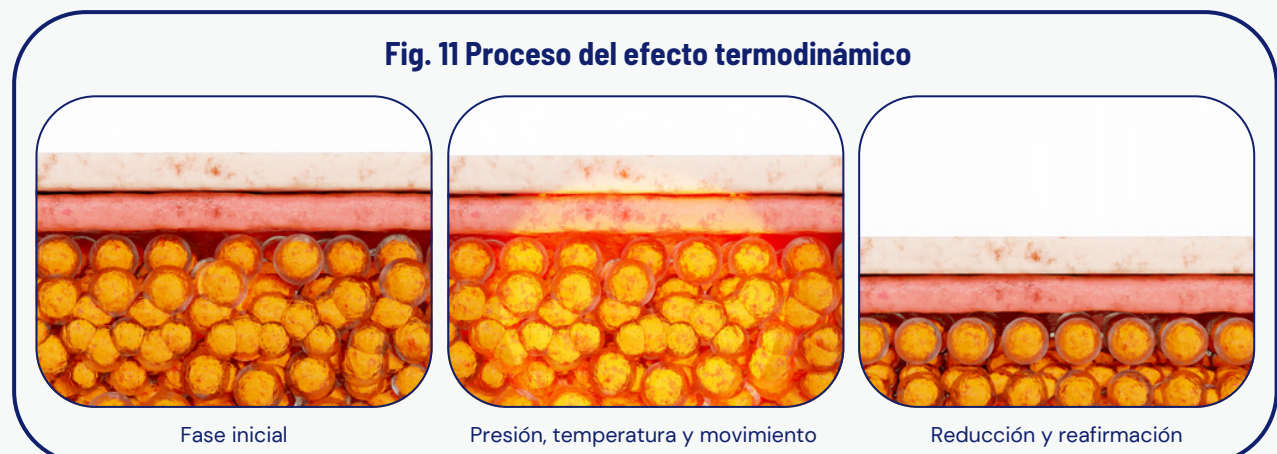

Efecto termodinámico

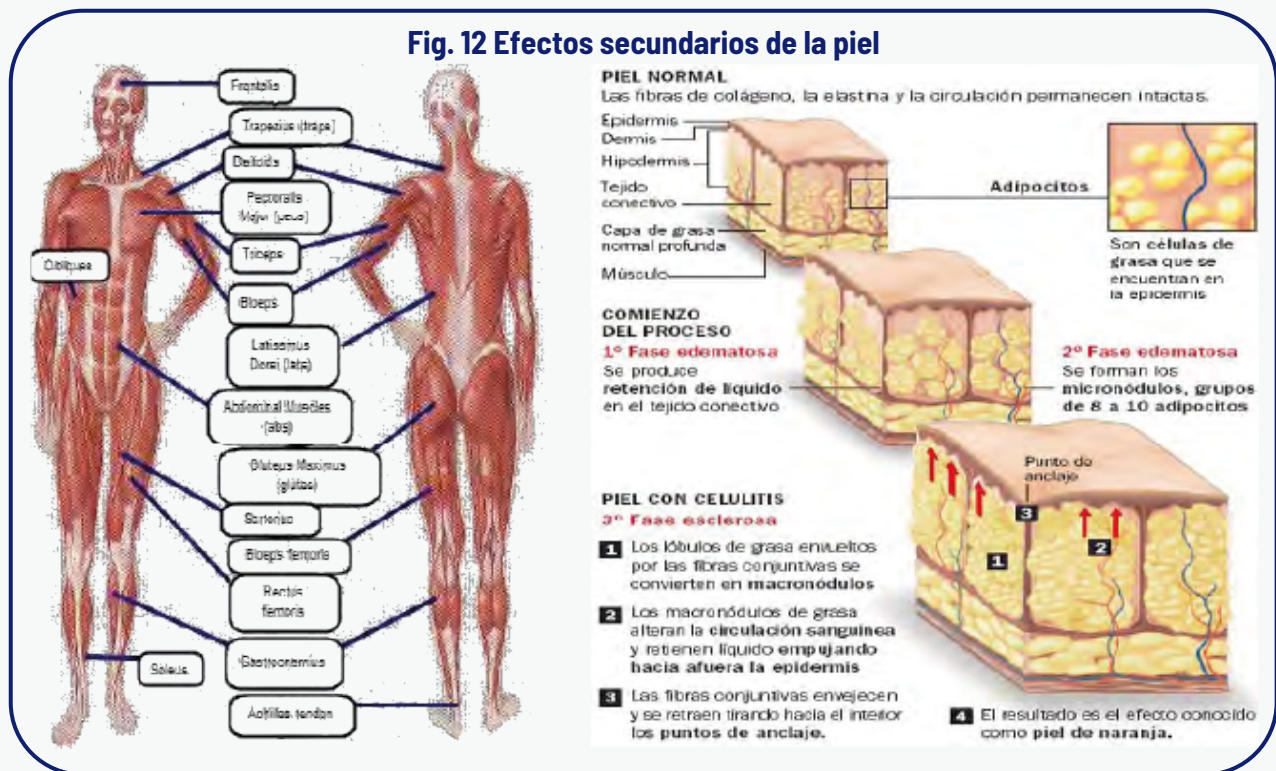

Triple acción

- ❖ **Libera** grasa tras descomponerla en ácidos grasos de la capa subcutánea
- ❖ **Elimina** la grasa liberada a través de un drenaje linfático mejorado
 - Acelera el drenaje grasa líquida
 - Disminuye el tamaño de las células adiposas
 - Reduce la circunferencia y mejora el contorno corporal
 - Aumenta la circulación sanguínea y linfática optimizando así la oxigenación tisular y la desintoxicación
- ❖ **Remodela** la zona tratada mediante la reducción de la grasa localizada y la reafirmación de la piel

Antes del tratamiento - Anamnesis

Antes de comenzar cualquier tratamiento, se debe evaluar la zona a tratar y realizar las siguientes acciones:

- ❖ Hacer una historia médica y física del paciente detallada de tratamiento anteriores, incluyendo los métodos
- ❖ Determinar si el paciente es adecuado para el tratamiento (ver contraindicaciones).
- ❖ Informar al paciente del curso del tratamiento, los resultados típicos de tratamiento y los posibles efectos adversos.
- ❖ Se deben establecerse con precisión las expectativas de los pacientes , por ejemplo, tratamiento de reducción de la circunferencia no hará a un paciente bajar de peso.
- ❖ El paciente no debe subir de peso.
- ❖ Recomendar al paciente para combinar el tratamiento con dieta y ejercicio ya que esto ayudará a 'quemar' la grasa líquida liberada durante un tratamiento.
- ❖ Se recomienda que el paciente firme un formulario de consentimiento informado.

Información al paciente

- ❖ Área de Tratamiento
- ❖ Parámetros de tratamiento – la intensidad y tiempo de exposición
- ❖ Respuesta de la piel, reacción inmediata
- ❖ Mediciones
 - Peso: peso total del cuerpo se mide para mostrar que, aunque no hay ningún cambio en el peso, hay una reducción en la circunferencia.
 - Mediciones de circunferencia: toman siempre en condiciones fijas, grabado en el archivo del paciente.

Fotos antes y después para la documentación del progreso del tratamiento

- ❖ Las fotografías de la zona de tratamiento deben ser tomadas con condiciones fijas antes de cada sesión (se sugiere también tomar una foto después del primer tratamiento)
- ❖ La iluminación debe ser mantenida constante y evitar el uso de flash. El paciente no debería sonreír. Tome las fotos desde el mismo ángulo y la distancia.

*Utilice la ficha de datos de tratamiento del paciente para registrar la información del tratamiento del final del documento.

Gestión de las expectativas del paciente

La gestión de las expectativas del paciente es importante para asegurar su satisfacción.

Los resultados NO SON INMEDIATOS, la recuperación de la zona puede durar hasta 3 semanas después del tratamiento.

El número de sesiones variará dependiendo del grosor del tejido adiposo. El nº de sesiones estándar es de 4-6 tratamientos (dependiendo de la persona).

El tratamiento reduce el grosor del tejido adiposo transformando la grasa en energía que el cuerpo ha de consumir. Se recomienda ajustar dieta y estilo de vida)

La apariencia de la celulitis se mejora, pero no es totalmente eliminada. No todos los pacientes logran el mismo resultados

Programas de tratamiento

Hay disponible un programa predeterminado para cada área de tratamiento. También hay disponible 3 opciones de tratamiento por zona.

Programa Avanzado: específico para tratamientos ajustar de forma personalizada. Podemos escoger:

• **Intensidad:** Permite ajustar en varios parámetros de intensidad.

• **Pulso:** permite fracciona la emisión

Procedimiento

Dependiendo si existe mayor cantidad de grasa o de flaccidez se pueden hacer dos procedimientos diferentes de tratamiento para diferentes áreas del cuerpo como se especifica a continuación:

1. Protocolo de tratamiento destinadas a la reducción de grasa Zonas de tratamiento: las nalgas, muslos, abdomen y brazos.

- Este protocolo incluye la utilización del **producto A**

2. Protocolo de tratamiento de estiramiento de la piel con menor pérdida de grasa. Destinado a zonas como brazos o con poco acúmulo graso

- Este protocolo incluye la utilización del **producto B**

Recomendaciones de utilización y seguridad

Realice movimientos lentos y continuos, sin detenerse.

Los movimientos han de ser de forma circular, elíptica o forma de 8. Mover el aplicador sobre la piel en la dirección de drenaje linfático preferiblemente

Atención de no detener el movimiento ya que esto puede causar molestias por sobrecalentamiento y potencialmente quemar. Por esta razón no se recomiendan movimientos hacia atrás y adelante

Se recomienda aumentar los parámetros de tratamiento ya que están pensados para comenzar modo testeo de tolerancia

- Comience con la configuración predeterminada
- Supervisar la tolerancia y la incomodidad del paciente
- Ajustar la configuración en consecuencia (aumento / disminución)

Hay ocasiones en las que se recomienda para obtener mejores resultados aumentar el tiempo de tratamiento sin sobrepasar los 40 minutos totales

IMPORTANTE: TODOS LOS OPERADORES DEBEN LEER EL MANUAL DE USUARIO Y RECIBIR CAPACITACIÓN DE UN FORMADOR CERTIFICADO


Procedimiento de Aplicación

- Abdomen
- Flancos
- Glúteos
- Piernas
- Brazos

Tratamiento del abdomen

1. Escoger opción Abdomen
2. Determinar el tiempo de tratamiento según la cantidad de cuadrantes
3. El tratamiento de abdomen es de 20 a 30 minutos, según volumen.
4. Escoger intensidad del tratamiento de inicio
5. Apretar la Flecha de inicio para empezar a trabajar Si es necesario parar el tratamiento usar el comando II


Se recomienda dividir la zona a tratar en cuadrantes de 10x10 cm. Los movimientos pueden ser circulares o formando 8 durante unos 10 minutos por cuadrante. Es importante no trabajar muy rápido para concentrar la energía y que pueda aumentar la temperatura.

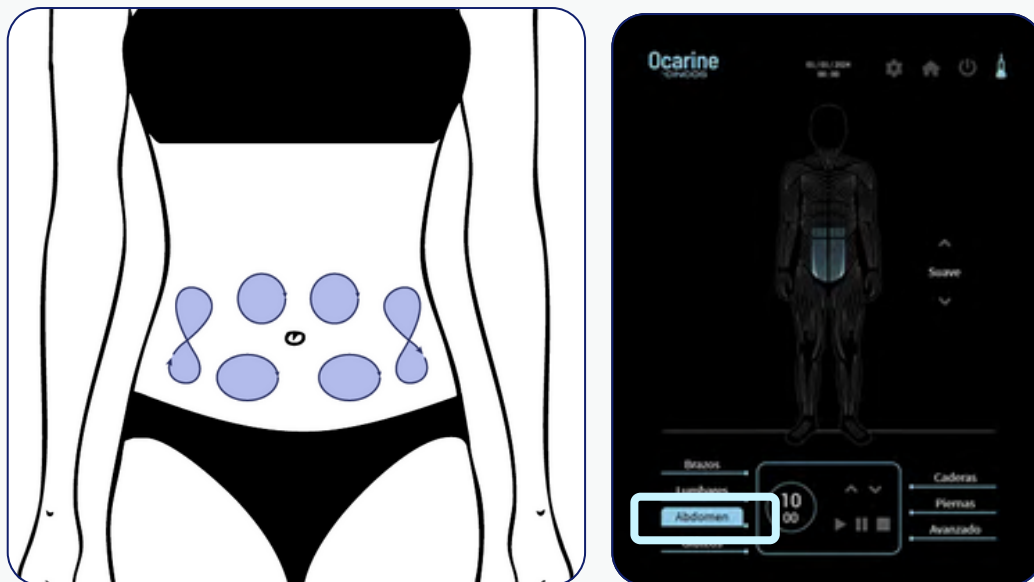

Tratamiento de Flancos

1. Colocar al cliente/paciente en posición lateral.
2. Dividir la zona en cuadrantes de 10x10 cm.
3. Trabajar de forma lenta y continuada en forma de círculos o de 8 durante 10 minutos por cuadrante

NOTA: no sobrepasar 40 minutos por sesión para no sobrepasar los órganos encargados del filtrado de la sangre.

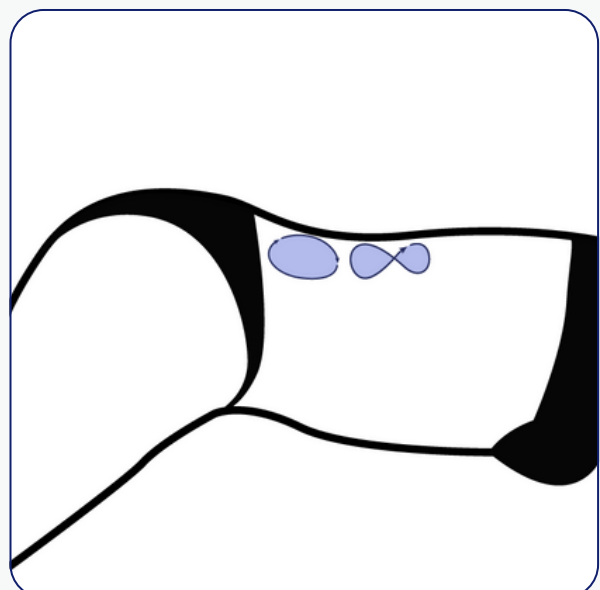

Tratamiento glúteos



1. Escoger opción glúteos
2. Determinar el tiempo de tratamiento según la cantidad de cuadrantes
3. El tratamiento de glúteos es de 20 a 40 minutos, según la cantidad de zona.
4. Escoger intensidad del tratamiento de inicio
5. Apretar la Flecha de inicio para empezar a trabajar

Si es necesario parar el tratamiento usar el comando II

Áreas de trabajo del tratamiento:


- Cachete (centro)
- Cachete(lateral)
- 'Banana subglútea'

Tratamiento de "Banana subglútea" – el tratamiento se prolonga a la parte superior del muslo con el aplicador. Se realiza un movimiento elíptico debajo de los glúteos y empuja hacia arriba.


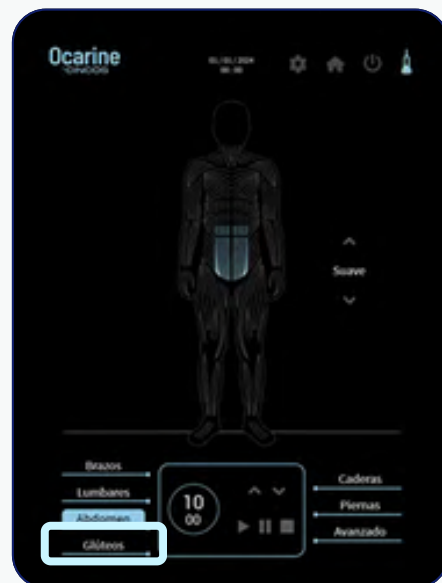
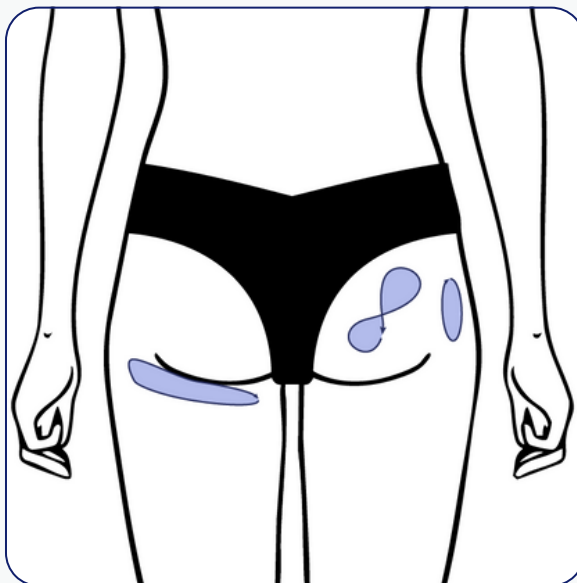


Tratamiento de piernas

1. Escoger opción piernas
 2. Determinar el tiempo de tratamiento según la cantidad de cuadrantes
 3. El tratamiento de glúteos es de 20 a 40 minutos, según la cantidad de zona.
 4. Escoger intensidad del tratamiento de inicio
 5. Apretar la Flecha de inicio para empezar a trabajar
- Si es necesario parar el tratamiento usar el comando II

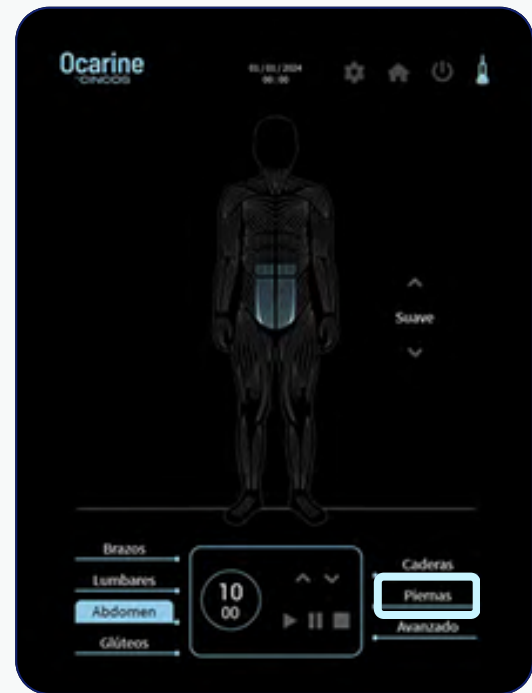

- Colocar al cliente/paciente en posición lateral.
- Dividir la zona en cuadrantes de 10x10 cm.
- Trabajar de forma lenta y continuada en forma de círculos o de 8 durante 10 minutos por cuadrante.
- Trabajar en ambas piernas por sectores pero no excediendo los 40 minutos por sesión.

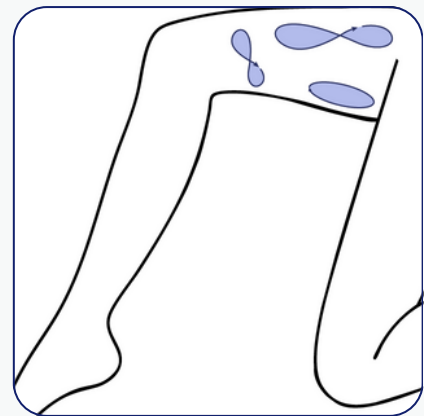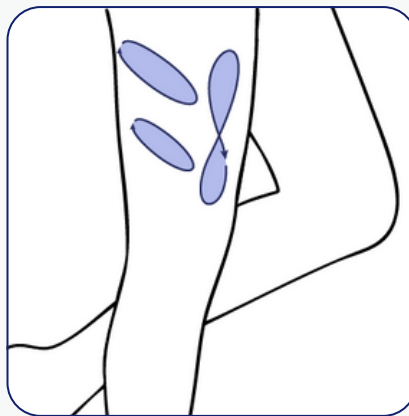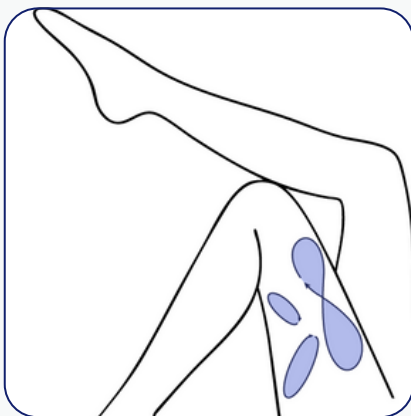

Tratamiento de brazos


1. Escoger opción Brazos
2. Determinar el tiempo de tratamiento según la cantidad de cuadrantes
3. El tratamiento de glúteos es de 20 a 40 minutos, según la cantidad de zona.
4. Escoger intensidad del tratamiento de inicio
5. Apretar la Flecha de inicio para empezar a trabajar



Si es necesario parar el tratamiento usar el comando II

- Trabajar en pequeños movimientos elípticos por la circunferencia del brazo
- Tratar toda la circunferencia del brazo
- Concéntrese en las áreas problemáticas por cuadrantes de 10x10 cm
- Asegúrese de que los movimientos son continuos para evitar sobrecalentamiento ya que es zona de menor profundidad.


EVITE EL ÁREA DE LA AXILA

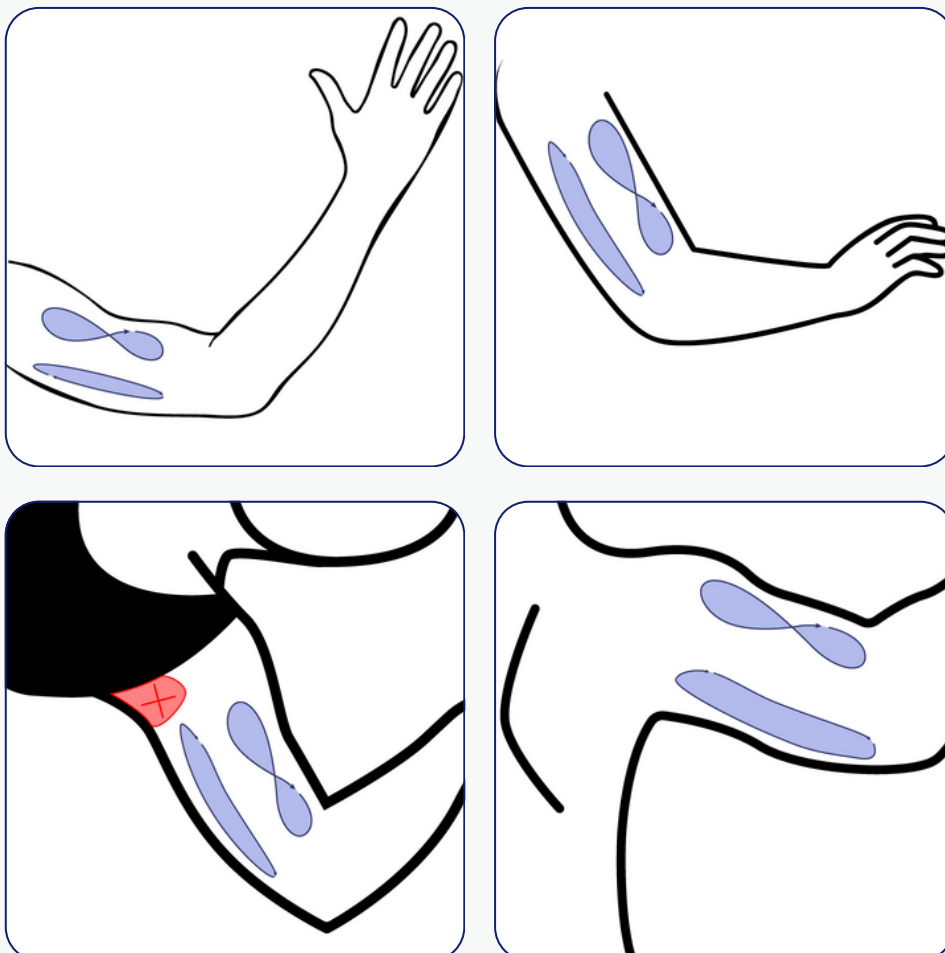

Descripción general del sistema



Pantalla de inicio

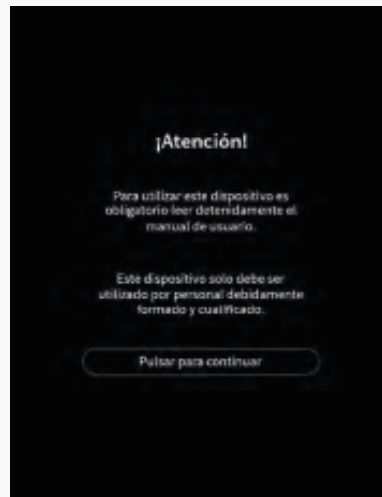


Pantalla advertencias seguridad



Pantalla inicio tratamientos



Pantalla de tratamiento de Abdomen seleccionado

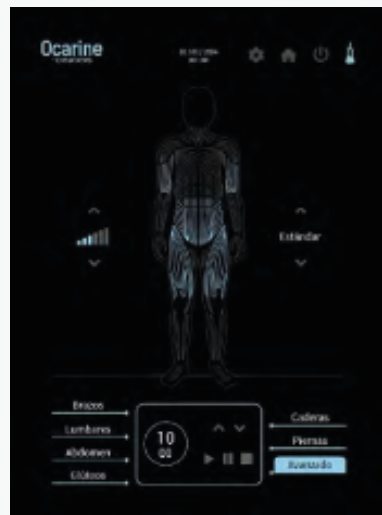

Pantalla de inicio del tratamiento avanzado



Pantalla de configuración

DOCUMENTO PREVIO INFORMATIVO SOBRE TRATAMIENTO CORPORAL CON EL EQUIPO OCARINE

En _____ a _____

Nombre del cliente:

DNI N°:

Domicilio:

Fecha de Nacimiento:

Localidad y CP:

Teléfono:

DECLARO:

Que por el presente documento REQUIERO Y AUTORIZO a los profesionales _____
_____ que me realicen el tratamiento de _____
con el equipo de OCARINE

BREVE EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON OCARINE

El centro y su equipo utilizan para tratamientos corporales el equipo Ocarine que combina una onda electromagnética con una onda ultrasónica en sincronía en forma de emisión de efecto termodinámico.

La unión de estos dos sistemas aplicados directamente sobre la piel permite una reducción evidente de la celulitis, un moldeado corporal, así como una tonificación y firmeza del tejido.

Se me ha informado de que el tratamiento completo de una zona se consigue en un mínimo de 4/6 sesiones (1 sesiones semanales con espacio de 2/3 semanas sobre la misma zona), si bien este número puede ser variable en función del problema a tratar y de las variables individuales que presente.

CONTRAINDICACIONES

- Marcapasos.
- Injertos metálicos en el área de tratamiento
- Cáncer en curso o historial de cáncer, especialmente de piel o lunares premalignos.
- Embarazo y lactancia.
- Historial de cicatrización queloide.
- Infecciones cutáneas en el área de tratamiento.
- Diabetes (I. II.)
- Patologías cardiovasculares: insuficiencia cardiaca, flebitis, insuficiencia linfática.
- Insuficiencia renal.
- Posible aumento del sangrado durante la menstruación

Además, se me ha informado de que debo comunicar al personal del centro el consumo de cualquier sustancia farmacológica, así como cambios en mi estado basal (embarazo, enfermedades, alergias, etc.).

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

El tratamiento normalmente es poco molesto, si bien dependerá del umbral de sensibilidad individual. No suele presentar complicaciones pero entiendo la posibilidad de que aparezcan **Efectos Secundarios** durante o poco tiempo después del tratamiento, como son: enrojecimiento (eritema), petequias (pequeños puntos hemorrágicos), hematomas (moratones), sensación de calor en la zona y ligera irritación de la piel, puede producir pequeña quemadura a causa de un mal contacto causada por algún movimiento del paciente.

CONFIRMO que el tratamiento mencionado me ha sido explicado a fondo, por un profesional en palabras comprensibles para mí, los riesgos que tiene, los efectos no deseados, los riesgos por mis características personales, así como las molestias o, en ocasiones, dolores que puedo sentir teniendo una evolución normal. Se me han explicado igualmente otras opciones de remodelación corporal disponibles en el mercado con los pros y contras de cada una de ellas. Teniendo esto en cuenta he escogido el procedimiento con OCARINE explicado como tratamiento de remodelación eficaz y no perjudicial para mi salud.

ME COMPROMETO a seguir fielmente, en lo mejor de mis posibilidades, las instrucciones del profesional para antes, durante y después del tratamiento antes mencionado, quedando bajo mi responsabilidad el cumplimiento del protocolo fijado para mi tratamiento, por el cual me comprometo a recibir 1 tratamiento a la semana con intervalo de 2/3 semanas durante 4/6 sesiones. Acepto que el no cumplimiento de este protocolo puede provocar que los resultados no sean los esperados.

DOY FE de no haber omitido o alterado datos al exponer mi historial y antecedentes clínico-quirúrgicos, especialmente los referidos a alergias y enfermedades o riesgos personales.

AUTORIZO a que se me practiquen fotografías de la zona tratada, quedando entendido que su uso no constituya ninguna violación a la intimidad o confidencialidad, a las que tengo derecho.

ACEPTO que el resultado clínico varía en función del área a tratar y de variables individuales.

RECONOZCO que los resultados esperables de un tratamiento nunca son milagrosos, sino que están sometidos a las limitaciones de la técnica.

COMPREENDO que el resultado pueda no ser el esperado por mí. Reconozco que no se me ha dado en absoluto tal garantía.

ME CONSTA que mis datos van a ser tratados de forma automatizada, lo cual autorizo. Se me ha informado, igualmente, de mi derecho a rechazar o revocar este consentimiento.

He podido aclarar mis dudas acerca de todo lo anteriormente expuesto y he entendido totalmente este DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO reafirmandome en todos y cada uno de sus puntos y con la firma del documento EN TODAS LAS PÁGINAS Y POR DUPLICADO ratifico y consiento que el tratamiento se realice.

Rechazo el tratamiento y declaro que he sido ampliamente informado de las consecuencias de mi decisión.

El centro

El cliente

Representante legal

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos serán incluidos en un fichero denominado PACIENTES, del que es responsable,..... inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. La finalidad de esta recogida de datos será la de mantener la relación establecida entre el cliente y Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a....., con dirección indicando en la comunicación "Protección de datos".

Ficha de datos del tratamiento

Nombre

Fecha

Peso inicial

Zona a tratar

Medidas iniciales

Abdomen

1

2

3

Caderas

3

Muslo

4

5


Rodilla

6

Brazo

7

8

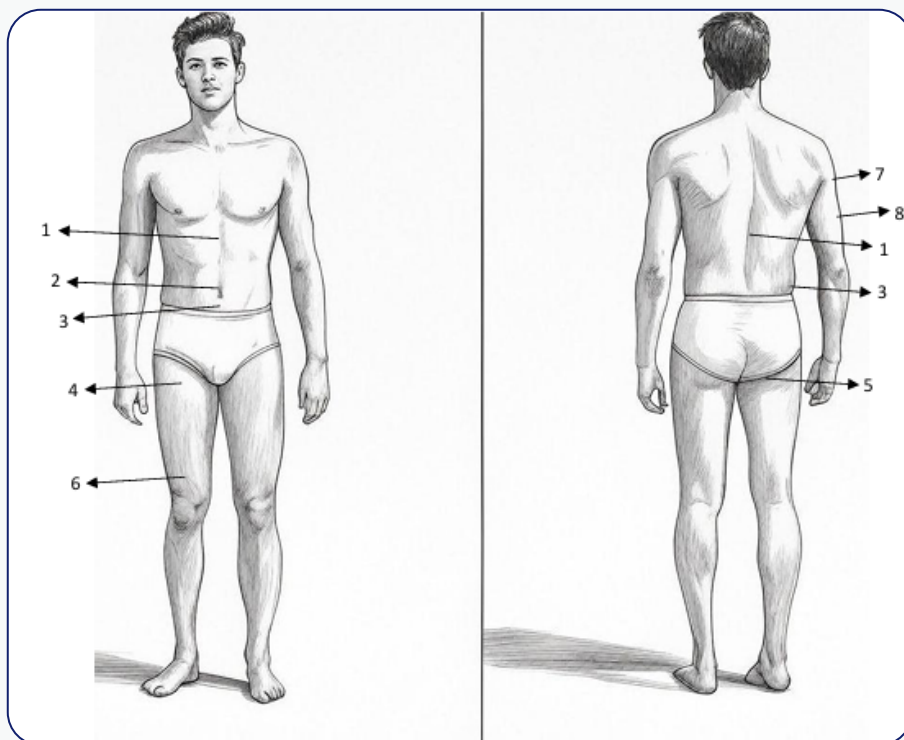

Tratamientos adicionales

Observaciones

Ficha de datos del tratamiento

Nombre

Fecha

Peso inicial

Zona a tratar

Medidas iniciales

Abdomen

1

2

3

Caderas

3

Muslo

4

5


Rodilla

6

Brazo

7

8

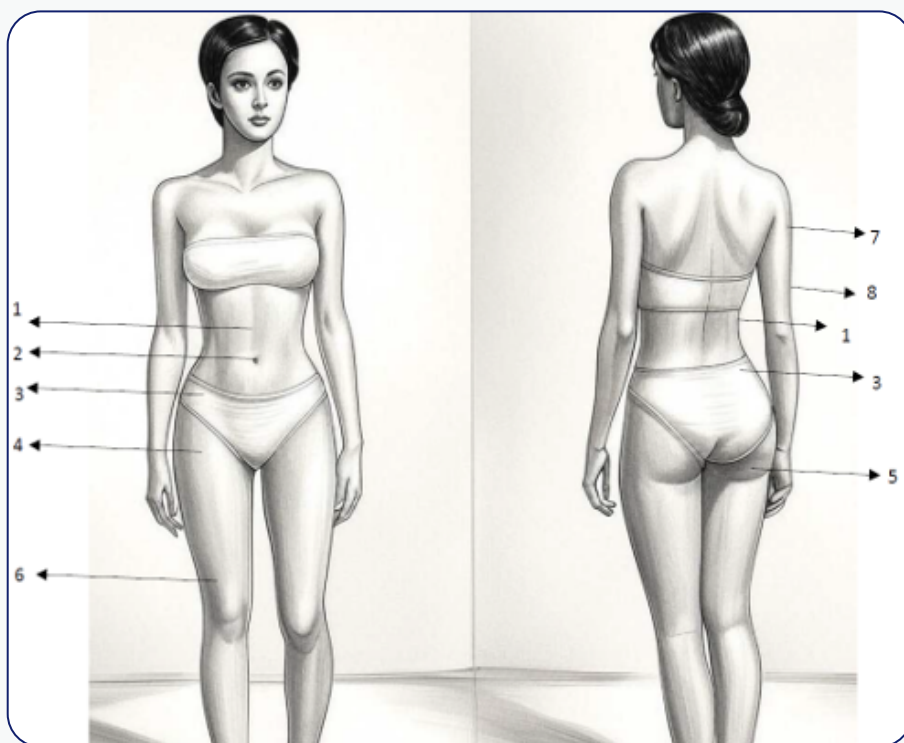

Tratamientos adicionales

Observaciones

Ficha de datos del tratamiento

Fecha	Zona	Nº sesión	Medidas								Intensidad	Observaciones
			1	2	3	4	5	6	7	8		

Información adicional